

あっという間に設置完了。
いろんな場所であなただを支える。

ニューラインナップ

240


ベランダや縁側への設置に
立ち座りの補助や姿勢保持に



240



240T

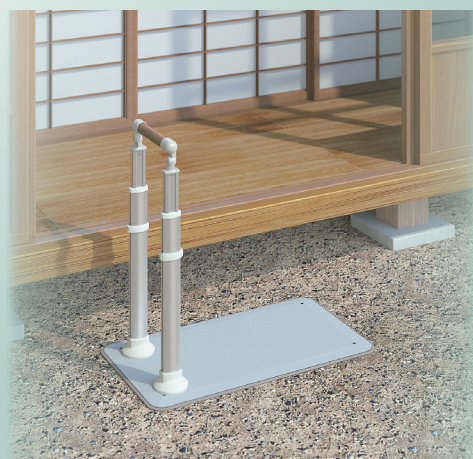

ニューラインナップ

630

狭い玄関や小さい段差への設置に
段差昇降や歩行の補助に



630



630T



930

ポーチ部や玄関への設置に
段差昇降や歩行の補助に



930



930T





工事不要であつという間に手すりが設置できるから、 住宅改修できなかった方の 声に応えることができます。

住宅改修でよくあるお困りごと



時間がかかる。

骨折をしてしまった…。すぐにでも手すりがほしいけど、住宅改修では設置までに時間がかかる。



お金がかかる。

以前に住宅改修を行ったので、追加の工事は介護保険の限度額を超えてしまう。



賃貸だからあきらめてた。

賃貸住宅なので工事申請ができないが、手すりがないと移動がづらい。



手すりを外せない。

住宅改修する前に本当に使えるか試してみたい。でも、一度取り付けると外せないからなあ…。



こんな悩みを
解決!!



家が傷つく。

代々受け継いだ家なので住宅改修して家が傷つくのは困る。



240

1枚プレートで使い勝手向上。
手すりとして、支えとして、
片手動作を補助します。



Case:1

ベランダへの出入りの
動作が不安。



Point

ベランダに出る際の動作が
安定するように手すりを設置。

ベランダ



Case:2

洗面所、脱衣所での
体位を支える手すりが欲しい。

洗面所



Point

利用者の姿勢保持の
ために手すりを設置。



立ち座りの補助



姿勢保持


630

930

段差昇降の補助、動線の確保に。
環境に応じたサイズを選べます。

段差に対応

ポーチ部分や上がりかまちなどの段差に設置できます。
上下首振り機能で無段階に調節できます。

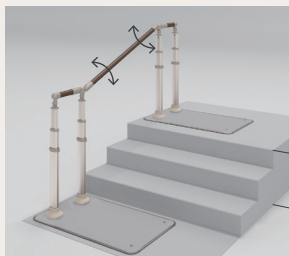


30cm まで対応
(630 タイプ)

45cm まで対応
(930 タイプ)

障害物がある動線に対応

設置したい場所が真っ直ぐとは限りません。そんなときに、左右にも首振り機能があるので、利用者が使いやすい場所に設置できます。

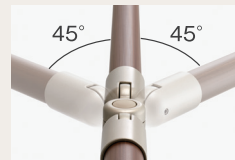

左右に 45°ずつまで首振り
できます。

630



630



630T

Case:3

外に出るまでに段差があるので
手すりが欲しい。



ポーチ



Point

利用者の昇降動作が
安定するように、
段差部に手すりを
設置。

Case:4

窓から柵まで遠いので
歩いていくのが不安。



ベランダ



Point

利用者がたって
歩けるように
手すりを設置。

930



930



930T

Case:5

玄関の上がりかまちが
高いので、手すりが欲しい。



玄関



Point

玄関から室内まで
連続して歩行が安定
するよう手すりを設置。



Case:6

玄関から外に出るまでの
動線に沿った手すりが欲しい。



ポーチ



Point

手すりの首振り機能を
利用し、動線に沿って
手すりを設置。



使う人に応じて手すりの片側、
両側タイプが選べます。

■スタンダードな
片側タイプ



■より安心して歩行したい方には
両側タイプ



簡単に行える支柱固定と
高さ調節

支柱はベースプレート上面から六角レンチで固定します。手すり高さの調節は、差し込み固定ピン方式なので工具なしですぐに調節できます。

■支柱の固定




■高さ調整



仕様

	AT-C-240	AT-C-240T	AT-C-630	AT-C-630T	AT-C-930	AT-C-930T
価格	110,000円(税抜)	160,000円(税抜)	220,000円(税抜)	320,000円(税抜)	220,000円(税抜)	320,000円(税抜)
商品コード	870-140	870-141	870-142	870-143	870-130	870-131
TAIS	00221-000542	00221-000543	00221-000544	00221-000545	00221-000500	00221-000501
JAN	49-70210-00119-6	49-70210-00120-2	49-70210-00121-9	49-70210-00122-6	49-70210-85445-7	49-70210-85446-4
梱包入数	1	1	1	1	1	1
重量	約19kg	約22kg	約39kg	約47kg	約39kg	約48kg

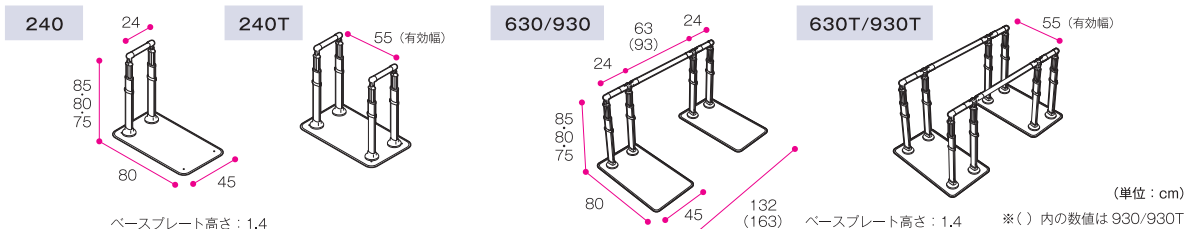

最大使用者
体重
100Kg

部 品 名	材 質
手すり	ウッドパウダー混合半硬質樹脂/アルミニウム
支柱、高さ調節支柱	アルミニウム
ベースプレート、固定プレート	ステンレス
高さ調節固定ピン	ポリエチレン/ステンレス
支柱端部カバー	AES樹脂

福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与対象品


部 品 名	材 質
エンド支柱ブラケット	アルミ合金
可変支柱ブラケット(可動部)	
可変支柱ブラケット(回転部 上・下)	
滑り止めシートKA(大、小丸)	(表面)発泡ウレタンゴム (接着面)アクリル系接着剤
端末保護カバー	塩化ビニル樹脂
その他 樹脂部	ポリプロピレン

設置条件

630/630T、930/930T


●平坦な場所に設置する場合
※斜面に設置しないでください。

ベースプレートとの距離寸法
(630/630T) 42cm 目安
(930/930T) 73cm 目安

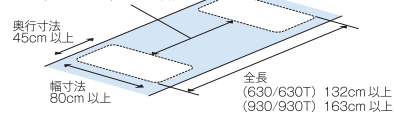


●段差のある場所に設置する場合

ベースプレートとの距離寸法
(630/630T) 段差高さ30cmの場合: 42cm 目安
(930/930T) 段差高さ45cmの場合: 73cm 目安

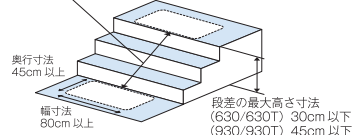


・手すりの角度は45°以内に
納まるように設置してください。
・2枚のベースプレートは
平行になるように設置して
ください。

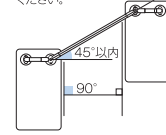

共通

ベースプレートよりも小さい縁石や凹凸が大きい床面、
芝生、滑りやすい床面の上には設置できません。

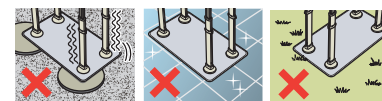

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011
福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
●このカタログの商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
●製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)

■お問い合わせは…