

スリングシート

■ スリングシートの選び方

	脚分離型	シート型	セバレート型 (ベルト型)	ハイジーン型 (トイレ用)
	<p>片足ずつ分けて支えます。座位で着脱できる標準型のスリングシートです。身体との接触面積がシート型に次いで大きいので、吊りあげが安定しています。</p> <p>【注意】 身体機能との適合範囲が比較的大いですが、股関節の固定力が弱いためお尻が落ちやすくなります。</p>	<p>1枚のシートで身体を包み込みます。身体との接触面積が大きく、股関節にかかる力が少ないので、ご本人様も楽です。</p> <p>【注意】 座位で着脱はできません。臥位でおこないます。車椅子着座後は敷き込んだままになります。</p>	<p>2本のベルトで背と太ももを支えます。着脱はもつとも簡単です。吊りあげた状態で下着の着脱ができるので、トイレへの移乗や排泄介助にも利用できます。</p> <p>【注意】 身体機能との適合範囲がもつとも狭く、状態によってはベルトの間から抜け落ちる、ベルトの上を滑り落ちる可能性があります。</p>	<p>脚分離型のお尻の覆いを小さくした形状です。吊りあげた状態で下着の着脱ができるので、トイレへの移乗や排泄介助にも適しています。</p> <p>【注意】 脚分離型とセバレート型との中間的な吊り具です。身体機能によってはお尻が落ちやすくなります。</p>
<p>(骨盤部の支持で座れる方に)</p> <p>ローバックタイプ</p> 	<p>ローバックR</p> <p>脚分離型 ライトスリング</p> 		<p>セバレート型スリング</p> 	<p>ハイジーンスリング</p> <p>ハイジーンR ローバック</p> 
<p>(体幹の支持を必要とする方に)</p> <p>ミドルバックタイプ</p> 	<p>ベーシックR</p> <p>KQ-T57</p> 	<p>クラシックR</p> <p>KQ-T55</p> 		
<p>(頭部の支持を必要とする方に)</p> <p>ハイバックタイプ</p> 	<p>ハイバックR</p> <p>フレキシブルR 脚分離型</p> <p>KQ-T58</p> 	<p>クラシック ハイバックR</p> <p>フレキシブルR シート型</p> <p>KQ-T56</p> 		<p>ハイジーンR ハイバック</p> 
<p>片脚・両脚切断者対応</p> <p>アンブスリングR</p> 			<p>身体を起こせない方用</p> <p>セーフハンドリング シートR</p> 	
<p>立位・歩行用</p> <p>ウォーキングベストR</p> 			<p>上肢・下肢用</p> <p>リムスリング</p> 	

注意 スリングシートを使用する際のご注意 ●お使いになる方の体格や症状に合わないスリングシートは落下など危険な場合もありますので、必ず専門家にご相談ください。
●スリングシートは消耗品です。使用前にほつれ、破れなどをご確認ください。

※スリングシートはリフトとセットで購入する場合に限り、1枚だけ非課税となります。
※ローバックタイプのスリングシートとヘッドサポートをリフトとセットで購入した場合は、いずれも1枚だけ非課税となります。
※製品によってはお届けに時間がかかる場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
※掲載したスリングシート(標準品)以外にも、各種取り扱っています。詳しくは販売店にお問い合わせください。

介護用ベスト
フットレス
介護用ベストオプション
ポジションング
サポート
トランスファー
リフトスリング
モビリティ
手すり
椅子
食事支援
排泄用具